

Identificador marcador de placas

Proveedora médica en imagenología SA de CV
tel/fax. 52728466
Ing. María Luisa Minchaca Sanjuán
Atención a clientes
04455 32475487



*Visítenos en internet: www.pmimagenologia.com.mx
www.tecnologiahospitalaria.com
<http://www.facebook.com/pmimagenologia.mx>
pmimagenmexico@gmail.com

Marcador de placas de Rayos x



- Automático.
- Ajuste regulador de luz de fácil funcionamiento.
- Sólida pantalla de plástico que asegura un uniforme marcado de la placa.
- Señal audible que le permite saber cuando ha finalizado la exposición de la
- radiografía.
- Acepta todos los tamaños de placas radiográficas.
- Usa batería de 9 volts.
- Puede utilizar un transformador de 110 volts (opcional) sin ninguna modificación adicional
- Fuerte cubierta plástica a prueba de corrosión.

Instrucciones:

- Se prepara una tarjeta con el nombre, la fecha y el tipo de estudio o la información que se quiere poner en la película
- La película se saca de la caja en el cuarto oscuro, con la lámpara de seguridad
- En el marcador se mete la película con la tarjeta
- Se aprieta el botón, con lo cual se imprimen los datos en la película.
- Se mete la película al chasis
- Se realiza el estudio radiográfico al paciente
- Se revela la placa.